

DAHANCA 19

Forskrift til indsamling og nedfrysning af laboratorieprøver før behandlingsstart

På alle inkluderede patienter tages 2 stk. 10 ml EDTA-blod før start af behandling.

Glas 1:

Glasset mærkes med navn, cpr-nr., dato og hospital.

Sendes snarest muligt (helst ikke fredag) i dertil udleverede containere og adresseret kuvert til DAHANCA sekretariatet. Hvis blodprøven tages fredag og først sendes mandag bedes den opbevares i køleskab.

DAHANCA Sekretariat
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
Århus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 5, 2. sal
DK-8000 Århus C

Glas 2:

- Opbevares koldt (dvs. opbevares på isbad)
- Centrifugeres hurtigst muligt ved 1500 g (RCF) og 4⁰C
- Afpipetteres på isbad
- Buffy-coat og plasma afpipetteres i udleverede nunc-glas
- Der laves 2 stk. med buffy-coat og 4 stk. med plasma
- Alle prøver registreres på det dertil udleverede ark
- Nunc glassene mærkes med
 - o Dato
 - o Initialer på patienten (1.bogstav i hvert navn)
 - o Fortløbende prøver nr. samt hospitalskode (separerede med bindestreg). Se det udleverede ark
- Plasma og buffy-coat nedfryses ved –80 grader hurtigst muligt
- Disse prøver vil senere bliver indsamlet

15. september 2006

Kontaktpersoner:


Birthe Hermansen, tlf. 89492620, mail: birthe@oncology.dk
Kirsten Hillebrandt, tlf.: 89492620, mail: kirsten@oncology.dk
Inger Marie Horsman, tlf.: 89492620, mail: imj@oncology.dk

DAHANCA 19

Forskrift til indsamling og nedfrysning af laboratorieprøver før behandlingsstart.

På alle inkluderede patienter tages 2 stk. 10 ml EDTA-blod før start af behandling

Glas 1

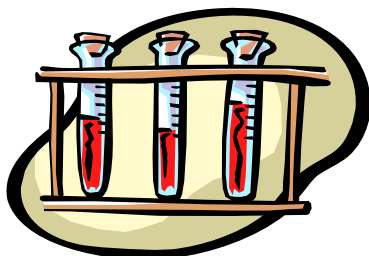


- 1- Sendes snarest muligt (helst ikke fredag) i dertil udleverede containere og adresseret kuvert til DAHANCA sekretariatet:
Hvis blodprøven tages fredag, og først sendes mandag bedes den opbevares i køleskab.

DAHANCA Sekretariat
Afdeling for Eksperimentel
Klinisk Onkologi
Århus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 5
DK-8000 Århus C
Tlf. 89492620

NB! Husk at mærke glasset med patientens CPR-nr., navn, dato og hospital.

Kontaktpersoner:
Birthe Hermansen, tlf. 89492620
mail: birthe@oncology.dk
Kirsten Hillebrandt, tlf.: 89492620
mail: kirsten@oncology.dk
Inger Marie Horsman, tlf.: 89492620
mail: imj@oncology.dk

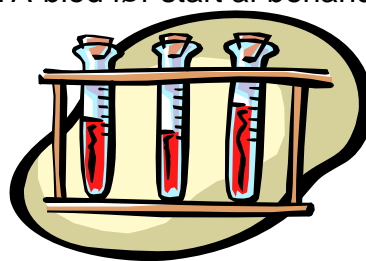

- 1- Opbevares på isbad
- 2- Centrifugeres hurtigst muligt



Centrifuge
1500 g (RCF)
ved 4°C

- 3- Afpipetteres på isbad
- 4- Afpipetteres i udleverede nunc-glas 1.8 ml



- 5- Der laves 2 stk. med buffy-coat og 4 stk. med plasma
- 6- Nunc glassene markeres med:

- Dato
- Initialer på patienten
- Forløbende prøve nr.
+ hospitalskode
(se det udleverede ark)

- 7- Alle prøver registreres på det dertil udleverede ark
- 8- Plasma og buffy-coat nedfryses ved -80 grader hurtigst muligt (max en time)
- 9- Disse prøver vil senere bliver indsamlet

11. september 2007